


# MOMiLUX L

## 收納氣壓腿部舒壓機 DFM-1601 R

### 商品說明書・保證書



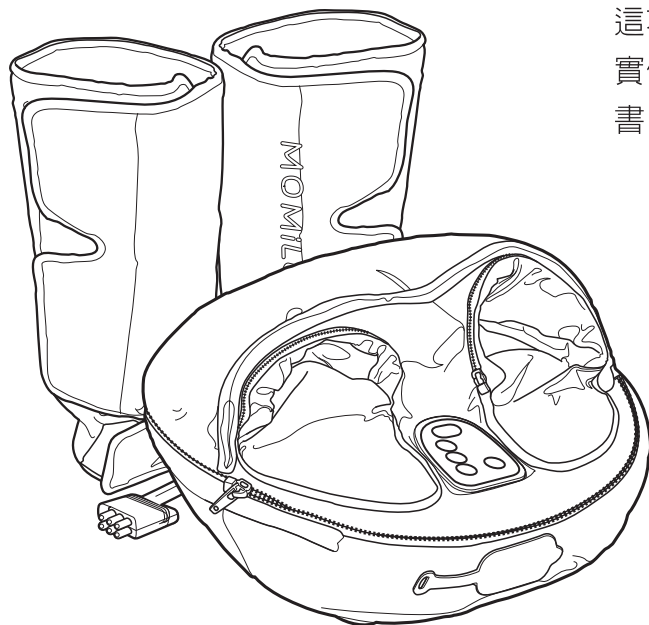

這次非常感謝你購買本公司產品。為確實使用本產品前務必請一定看這個說明書。然而請慎重保存。

#### 產品規格表



品名	MOMiLUX L 收納氣壓腿部舒壓機
型名	DFM-1601 R
電壓	AC110V 50-60Hz
消耗電力	DC24V 24W (加熱器 4.5W)
加壓度	最大 102kPa
計時器	約 15 分自動停止運作
商品尺寸	約寬 32 × 深 33 × 高 22 cm (本體)
重量	約 2.5kg (含有AC適配器)
腳的尺寸	27cm 以下
小腿肚尺寸	約 30 ~ 45 cm
布料材質	尼龍：83%，聚脂：17%

# 安全注意事項











- 使用前請詳細閱讀本「安全注意事項」內容，並請正確使用本產品。
- 此處所揭示記載之注意事項皆為關乎安全之重要內容，請務必遵守。
- 閱讀完本注意事項後，請務必存放於本產品使用者隨時可取得之處。

 <b>警告</b>	揭示記載若操作錯誤，有可能造成人員死亡或重傷的內容。
 <b>注意</b>	揭示記載若操作錯誤，有可能造成人員受傷或物品損毀的內容。 (物品的損毀指的是對於家宅、家財、家畜、寵物等造成的擴大損害。)







## 圖示符號的意思及範例

	⊘ 的意思是「不可以做的事情」。具體的禁止內容會揭示記載於 ⊘ 之中或附近的插圖、文章內。 (左圖的情形，指的是「禁止拆解」。)
	● 的意思是「務必要做的事情」。具體的強制內容會揭示記載於 ● 之中或附近的插圖、文章內。 (左圖的情形，指的是「將電源插頭自插座拔下」。)




# 警告

 指示	正在接受醫師治療，或者有以下情形的人，使用前請務必徵詢醫師的意見。 ● 體內裝設心律調整器等容易受到電磁障礙影響的醫用電子儀器的人。 ● 需要安靜休養的人。 ● 惡性腫瘤的患者 ● 心臟疾病的患者 ● 有發燒的症狀 (38°C 以上，發熱期)。(例：急性發炎症狀、倦怠感、惡寒、血壓變化較大的時期。身體衰弱的時期) ● 骨質疏鬆症的人、脊椎骨折、挫傷、肌肉拉傷等急性(疼痛性)疾患的人。 ● 懷孕初期的不穩定期或是剛生產完的人。 ● 想要在曾經接受治療或疾患部位使用的人 ● 脊椎異常或脊椎彎曲的人。 ● 自覺身體有異常症狀的時候。 ● 皮膚有創傷的人。 ● 糖尿病等造成重度末梢循環障礙而有知覺障礙的人。 ● 被診斷為喪失溫度感覺的人。 ● 使用後仍無效果的人。 ● 正在接受其他醫療機構治療中的人。				
 禁止	以下症狀的人請勿使用 有可能造成症狀惡化的原因。 ● 醫師囑咐不可接受按摩的人。 例：血栓塞栓症、重度動脈瘤、急性靜脈瘤、各種皮膚炎、各種皮膚感染症(包含皮下組織炎症)等。				
 禁止	請勿使用交流電110V以外的電源。 有可能造成火災、觸電、故障的原因。	 禁止	請勿將迴紋針、鐵線等金屬物、異物插入本體の間隙內。 有可能造成觸電、受傷的原因。	 拔掉插頭	清潔保養時，為了安全起見，請將電源插頭自電源插座拔下。 有可能造成觸電、火災、受傷的原因。
	請勿使電源連接線受傷、破損，或是加工、勉強折彎、拉長、扭轉、束綁、將重物放置其上、或挾住電線。 有可能造成火災、觸電的原因。	 指示	發現異常時(燒焦味、冒煙等)請拔下電源插頭，停止使用。 有可能造成火災、觸電的原因。	 分解禁止	請勿拆解。此外，非修理技術者請勿進行修理。有可能造成火災、觸電、受傷的原因。如需修理，請與銷售店家或本公司客服部門連繫(參考背面記載資訊)
	電源連接線或電源插頭受損、插入電源插座鬆動時請勿使用。 有可能造成觸電、短路、著火的原因。		請將電源插頭確實插入電源插座內部。 有可能造成觸電、短路、著火的原因。	 手濕禁止	手部沾濕時，請勿拔插電源插頭。 有可能造成觸電的原因。
	請勿讓兒童使用或在本體之上玩耍、乘坐。 有可能造成受傷或故障的原因。	 插頭拔下	不使用時請務必將電源插頭自電源插座拔下。 有可能因為絕緣劣化的影響，造成觸電、漏電、火災的原因。	 禁止淋水	請不要浸泡於水中，也不要淋水。請勿清洗足部護罩以外的部分。 有可能造成短路、觸電的原因。


## 警告

 指示	<p>使用前請確認護罩及其他部位有無破損。</p> <p>如果發現破損，不管是破損的狀態如何輕微，請立即停止使用，並將A C 適配器拔下，進行修理。</p> <p>如果在布套破損的狀態下使用，有可能造成觸電或受傷的原因。</p>	 禁止	<p>請勿於浴室等濕氣較重的場所使用。</p> <p>有可能造成觸電及故障的原因。</p>	 禁止	<p>請勿改造。</p> <p>有可能造成著火、異常動作、受傷的原因。</p>
 禁止	<p>使用時請勿將電源連接線束起或捲起。</p> <p>有可能造成著火或冒煙的原因。</p>	 禁止	<p>請勿站立於本體上，也請勿走動及用力站踏壓在本體上。</p> <p>有可能造成受傷或故障的原因。</p>	 禁止	<p>請勿使用於按摩以外的用途。也請勿使用於頭、胸、腹、骨骼（如手肘、膝蓋）等部位。</p> <p>有可能造成事故或受傷、身體不適的原因。</p>
	<p>請勿以裸膚或衣服沾濕的狀態下使用。</p> <p>有可能造成受傷或觸電的原因。</p>		<p>請勿一邊吸煙一邊使用，也請勿於暖爐等火氣附近使用。</p> <p>有可能造成火災的原因。</p>		<p>請勿上下或左右顛倒使用腿部護套。</p> <p>有可能造成事故或身體不適的原因。</p>
			<p>請勿在棉被或電暖桌下使用，也請勿在本體覆蓋毛巾使用。</p> <p>有可能導致內部溫度上昇，造成火災或事故、觸電的原因。</p>		<p>請勿作為營業用途使用。</p>


## 注意

 指示	<p>拔下電源插頭時，請勿拉扯電源連接線，務必手持電源插頭拔下。</p> <p>有可能造成觸電、短路、電源連接線斷線原因。</p>	 禁止	<p>請勿將本體或附屬品放置於直射日光下或是高溫場所。</p> <p>有可能造成褪色、受熱變形、故障的原因。</p>	 禁止	<p>請勿於就寢前使用。此外，貧血、疑似貧血的人亦請勿使用。</p> <p>就寢前、貧血、疑似貧血的人使用後，有可能對睡眠品質造成不良影響。</p>
	<p>每次使用時間請控制於15分鐘以內、並請避免在同一部位連續使用。</p> <p>有可能造成反效果或受傷的原因。</p>		<p>請勿直接接觸按摩皮膚。</p> <p>有可能造成受傷或事故的原因。</p>		<p>無論有無使用，請勿於本機上飲食。</p> <p>有可能造成觸電或故障的原因。</p>
	<p>使用中，如身體發生異常，請立即停止使用，並向醫生諮詢。</p> <p>有可能造成事故或受傷的原因。</p>		<p>請勿直接使用於發炎或傷口部位。</p> <p>有可能造成發炎或傷口惡化的原因。</p>		<p>請勿拆下足部護罩使用。</p> <p>有可能造成事故或受傷的原因。</p>
	<p>如果本產品無法運作，或感到異常時，請立即將電源插頭自電源插座拔下。</p> <p>有可能觸電、漏電、短路造成火災的原因。</p>		<p>本機器的表面會發熱，如對冷熱不敏感的人、無法表達自己意思的人、無法自己操作的人、請勿使用。</p> <p>有可能造成低溫燙傷或事故、受傷的原因。</p>		<p>足部護罩、腿部護套請勿使用附屬品以外的代用品。</p> <p>有可能造成故障的原因。</p>
	<p>請確實裝裝足部護罩及拉好足部護罩的拉鏈再使用。</p> <p>足部護罩的拉鏈如果沒有拉好，有可能造成傷害身體的原因。</p>		<p>請勿使用本產品附屬的A C 適配器與電源連接線以外的替代品。</p> <p>有可能造成故障的原因。</p>		<p>拔下氣壓接頭時，請勿拉扯通氣管。</p> <p>有可能造成破損、故障的原因。</p> <p>請手持氣壓接頭部分拔下。</p>
	<p>如果異常發熱、出現異音時，請立即將電源插頭自電源插座拔下。</p> <p>有可能造成內部的故障、火災的原因。</p>		<p>按摩中請勿將電源插頭自電源插座拔下。</p> <p>有可能造成觸電或著火、故障、受傷的原因。</p>		<p>請勿在車內使用。</p> <p>有可能造成事故、故障的原因。</p>
 禁止	<p>清潔保養時，請勿使用家庭用洗劑、溶劑、揮發油、酒精、研磨粉等。</p> <p>有可能造成變色、變形、觸電、故障的原因。</p>		<p>請勿與其他治療器具一起使用。</p> <p>有可能造成事故或受傷、身體不適的原因。</p>	 插頭拔下	<p>請勿摔落或給予強力衝擊。</p> <p>有可能造成觸電或短路、事故的原因。</p>
	<p>以下的狀態時請不要使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 極度疲勞時。</li> <li>• 酒醉時。</li> <li>• 濕疹發疹時。</li> <li>• 餐前、餐後（各1小時內）</li> </ul> <p>有可能造成身體不適的原因。</p>		<p>使用中請勿睡眠。</p> <p>無意識狀態使用，有可能造成身體異常或受傷的原因。</p>		<p>停電時，請立即將電源插頭自電源插座拔下。</p> <p>停電恢復時有可能造成事故或受傷的原因。</p>

# 產品各部位名稱

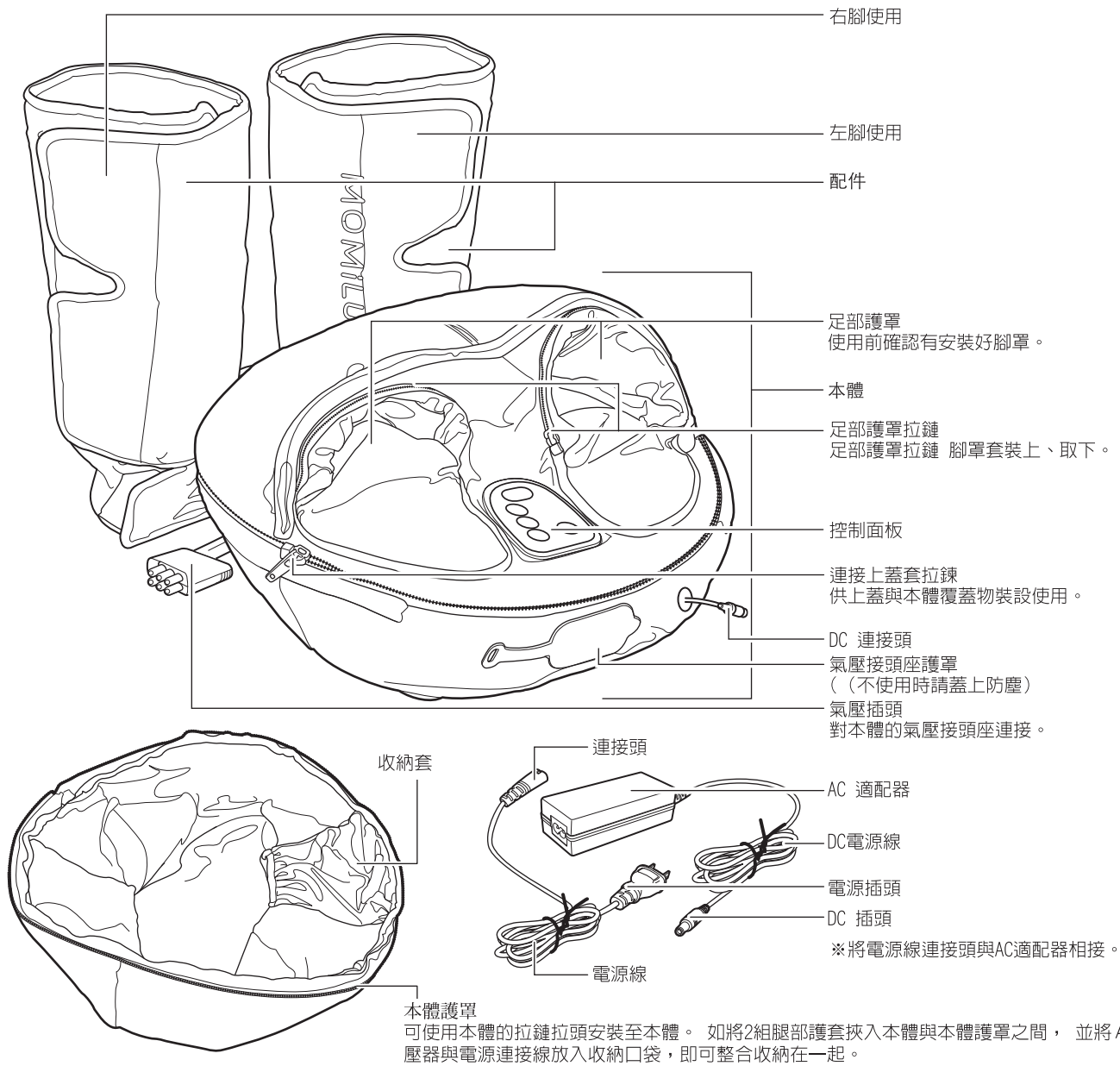

## 控制面板

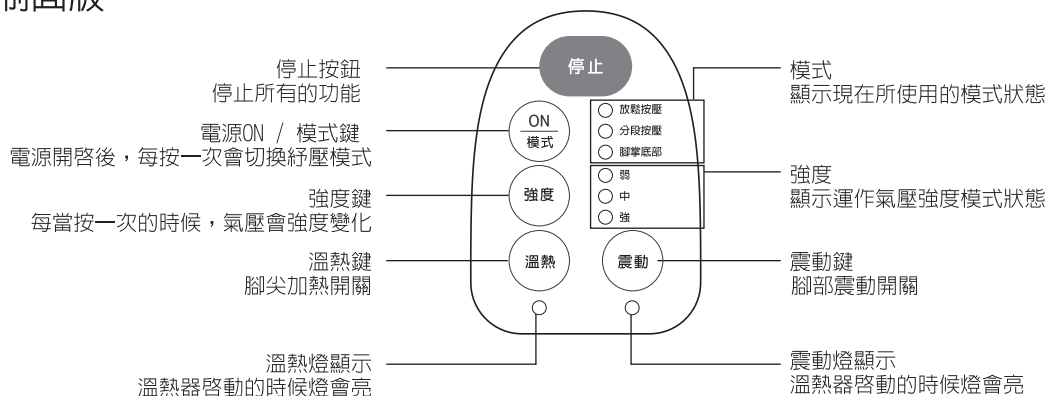

# 正確使用方式

## 效果、效能

- 按摩、代替按摩
  - 促進血液循環
  - 紓解疲勞
  - 神經痛
- 去除肌肉疲勞
- 舒緩僵硬
- 緩和肌肉疼痛

## 使用目的

- 限一般家庭使用



警告

- 腳罩未安裝時，不可使用。
- 在使用前，一定確認是否腳罩沒被破壞。另外，確認是否其他的部分也沒有毀損。
- 在有毀損的時候，或有任何小的毀損請立即中止使用，把電源插頭從插座拔離，並絕對不可使用。

## 使用前的準備

1. 設置於穩定不搖晃且具備承重力的水平地面

請設置於穩定的水平地面上。

2. 拆下本體護罩

將拉鏈拉頭朝箭頭方向拉動一圈，將本體護罩拆下。

3. 確實著裝足部護罩，並確認有無破損

- 發現破損時絕對請勿使用。

※ 購入時足部護罩包裝有運送用的發泡緩衝材，請將其拆下。

4. 將AC适配器的DC插頭連接至本體的DC電源連接器

5. 將電源連接線的連接插頭確實地插入AC适配器




注意


請將電源插頭確實插入電源插座內部，並將DC插頭確實插入本體側的DC電源連接器內部。

6. 取下本體的氣壓連接器護罩，將腿部護套的氣壓接頭安裝至本體的氣壓連接座


- 安裝時請將空氣接頭的「UP」朝上安裝。
- 請按壓插入至發出喀嚓聲響為止。
- 請確認腿部護套有無破損，如發現破損，請絕對不要使用。

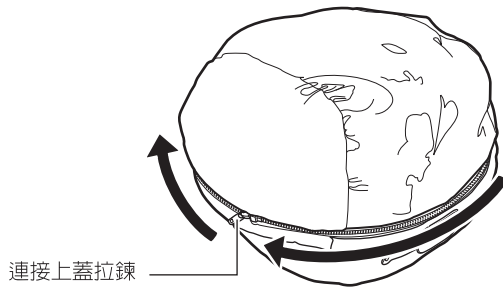

連接上蓋拉鍊

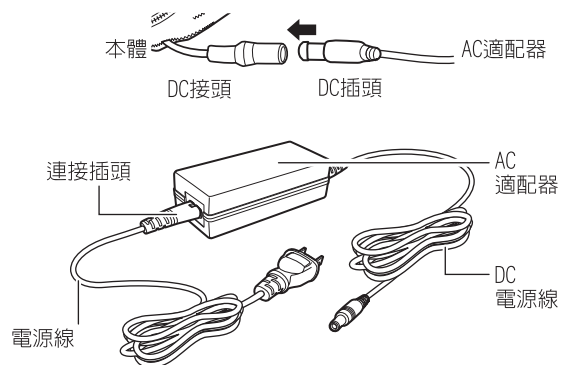

電源線

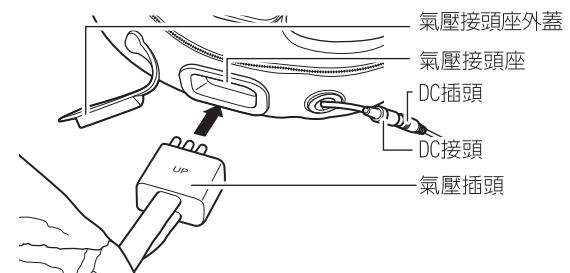

## 正確使用方式（接續）

### 7. 將電源插頭插入電源插座

使用時請勿將電源連接線與DC電源連接線束起或捲起。




注意

請設置於距離電視、收音機2m以上的位置  
有可能造成出現雜音的原因。

### 8. 確認電源 ON / 模式按鍵、強度按鍵、溫熱按鍵、震動按鍵、停止按鍵是否可以正常作動

一陣子未使用機器時，請在使用前確認機器可以正常且安全地作動

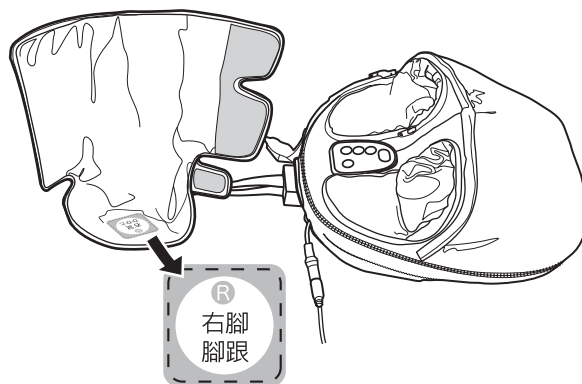

### 使用方法

#### 1. 在電源關閉的狀態下，依腳根位置的標示布章確認腿部護套的左右後，纏繞至兩腳小腿肚上著裝


以右圖①~⑤的順序纏繞著裝。依照纏繞方式的不同，可以調節按摩感的強弱。

- 請坐在椅子上進行著裝。
- 不使用腿部護套時，請將氣壓接頭自本體取下。




注意


- 請先穿著襪子或褲子後，再行著裝。
  - 請勿纏繞在小腿肚以外的部位。
  - 黏扣帶請確實貼緊。
- 著裝時黏扣帶請注意不要沾黏到衣服或絲襪。  
如果沒有確實緊密貼合的話，有可能會因為氣壓的強度而導致鬆脫。

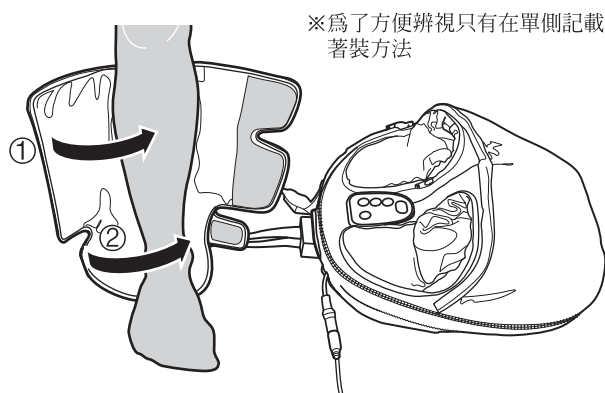

※為了方便辨視只有在單側記載著裝方法

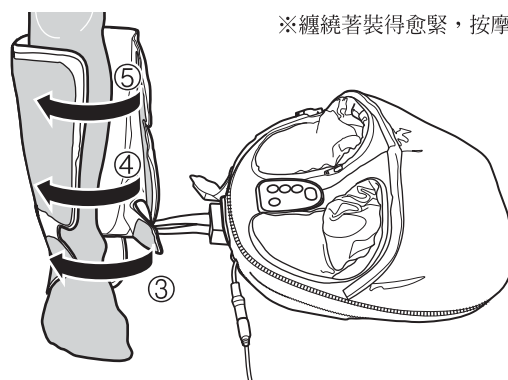

※纏繞著裝得愈緊，按摩感愈強

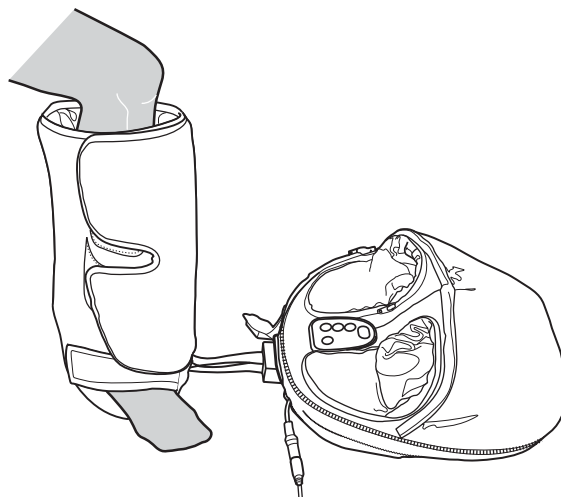

## 2. 將兩腳伸入本體的內部

請配合想要進行按摩的部位調整腳部位置的前後。

## 3. 按下電源 ON / 模式鍵，開始按摩




<b>⚠ 注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>請坐在椅子上使用。 若將全身體重都壓在本產品上，有可能造成故障的原因。按摩中請勿站起身來。</li><li>每次使用時間請控制在15分鐘以內。 有可能造成反效果或受傷的原因。</li><li>請勿使用於腳部・小腿肚以外的身體部位。 本產品為腳部專用。除了本來的使用方法以外，請勿使用其他用途。</li></ul>
<b>⚠ 警告</b>	緊急時請將電源插頭或DC插頭拔下。 即使因為充氣而造成腳部不易取出的狀態，只要拔下電源插頭，即可排出空氣，易於取出腳部。

### • 模式的選擇

#### 按下電源 ON / 模式按鍵，選擇動作模式

開啓電源即可動作所有的功能。每次按下電源ON / 模式按鍵，指示燈的位置就會出現變化，動作模式也隨之變化。

[①放鬆按壓] → [②分段按壓] → [③腳掌底部] → [①放鬆按壓] … (…以此反覆)

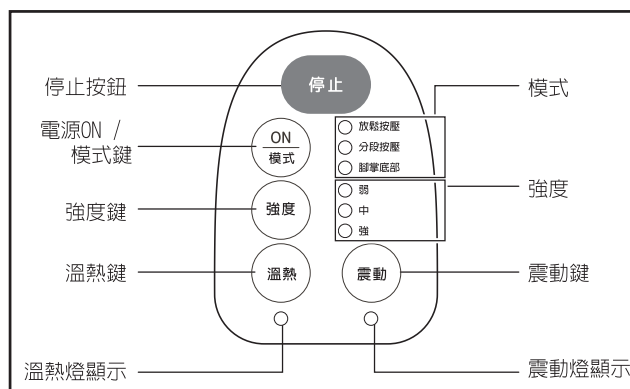

### 各種模式的動作

#### 放鬆按壓

以氣囊對腳底、腳踝、小腿肚的僵硬部位進行加壓。

#### 分段按壓

由腳尖到小腿肚階段性的加壓。

#### 腳掌底部

對腳部的腳掌側與足弓側開始加壓。

## 正確使用方式（接續）

### • 氣壓強度的調整


按下強度按鍵，即可以「弱」→「中」→「強」的順序調整強度

按下強度按鍵後，可以調整氣壓的強度。每次按下強度按鍵，指示燈的位置出現變化，強度也隨之變化。

[①弱]→[②中]→[③強]→[①弱]…（…以此反覆）

※ 小腿肚與腳掌底部無法個別調節，因此請以小腿肚的腿部護套纏繞方式來調節小腿肚的強度。

※ 以電源ON / 模式按鍵來變更模式時，會回復至 [ 弱 ]，請再度進行調整。

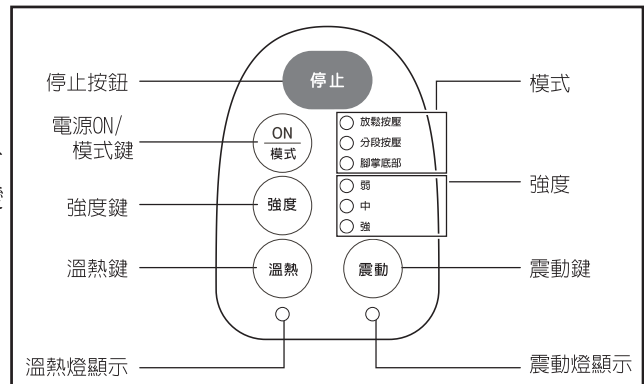

只要是在電源 ON 的狀態，隨時都可以進行模式的選擇、加熱器的開・關、震動功能開・關、氣壓強度的調整等各種不同切換。

### • 加熱器的切換

按下溫熱按鍵、選擇加熱器的「開」「關」

• 當加熱器「開」時，溫熱指示燈會亮燈。

• 進行內藏於腳尖裡面的加熱器的「開」「關」操作。

※ 加熱器並非以溫熱治療為目的的設備。

### • 震動功能的切換

按下震動按鍵，選擇震動器的「開」「關」

按下震動按鍵，即可對內藏於腳掌底部的震動器進行「開」「關」操作。

### • 自動定時關機

為了防止過度使用或忘記關機，定時器預設約 15分鐘後便會自動停止（加熱器也會停止）




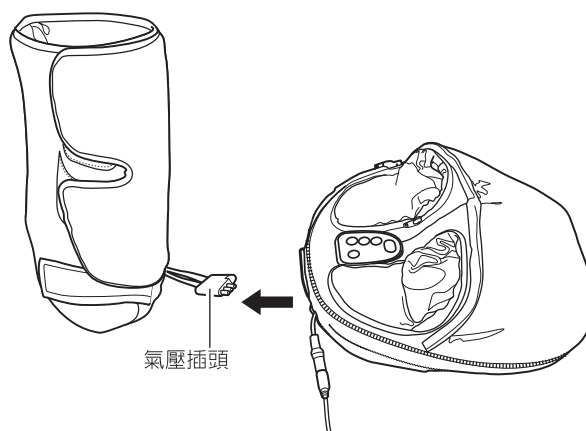
#### 4. 停止運轉

按下停止按鍵停止動作，將電源插頭自電源插座拔下

※ 按下停止按鍵後，所有的功能都會強制結束。

※ 爲了防止過度使用或忘記關機，定時器預設約15分鐘後便會自動停止。

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 不使用時請務必將電源插頭自電源插座拔下，有可能因爲絕緣劣化的影響，造成觸電・漏電・火災的原因。</li><li>• 拔下電源插頭時，請勿拉扯電源連接線，務必手持電源插頭拔下。有可能造成觸電・短路・電源連接線斷線原因。</li><li>• 使用時請勿將電源連接線束起或捲起。有可能造成著火或冒煙的原因。</li></ul>
---	--



#### 只按摩腳掌底部部位的使用方法

##### 1. 拆下腿部護套

拉開取下氣壓接頭，將腿部護套自本體拆下。蓋上氣壓連接座護罩。

##### 2. 將兩腳伸入本體內部

配合想要按摩的部位，前後調整腳部的位置。

##### 3. 以操作部的電源 ON / 模式按鍵選擇模式

設定爲腳掌底部。

##### 4. 以強度按鍵、溫熱按鍵、震動按鍵依個人喜好進行調整


按下此3類按鍵設定個人喜好的動作。

##### 5. 停止運轉

按下停止按鍵使動作停止，將電源插頭自電源插座拔下

※ 按下停止按鍵後，所有的功能都將強制結束。

※ 爲了防止過度使用或忘記關機，定時器設定爲約 15分鐘後便自動停止。

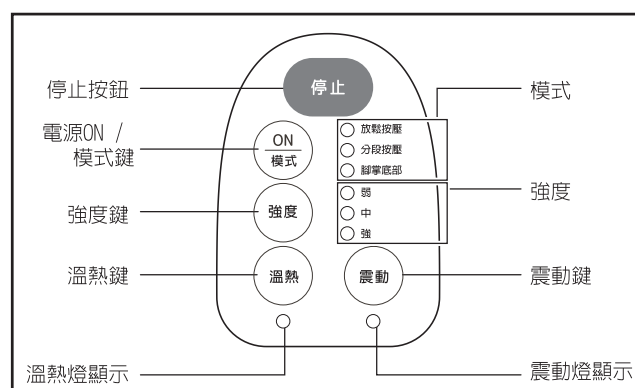

# 保養和保存



在保養之際，一定把電源線從插座上去掉，在加熱器使用的時候後確認本體冷卻。避免成爲觸電以及燙傷的原因。

## 希望配合事項

- 請絕對不要使用供住宅使用的洗滌劑以及稀釋劑，揮發油，酒精，拋光粉，清潔。
- 使用化學抹布時，請遵照該產品的使用說明書。
- 請勿直接淋水清洗本體。（有可能成爲觸電・故障的原因。）

## 本體的清潔保養


本體的髒污，可以將浸泡在溫水或餐具用中性洗劑（柑橘類除外）中的柔軟抹布擰乾後擦拭，接著再用乾布輕輕地擦乾表面。請勿用力磨擦，有可能造成損傷或布面破損的原因。

## 足部護罩的清潔保養

本產品可將足部護罩（足部插入部分）拆下來清洗。

### 足部護罩的拆下方法

1. 將電源插頭自電源插座拔下
2. 拉開護罩周圍的拉鍊
3. 拆下腳尖部位底面的黏扣帶拉鍊
4. 小心地自本體取出  
左右腳的拉鍊安裝位置爲對稱，可以同樣的方法拆下。

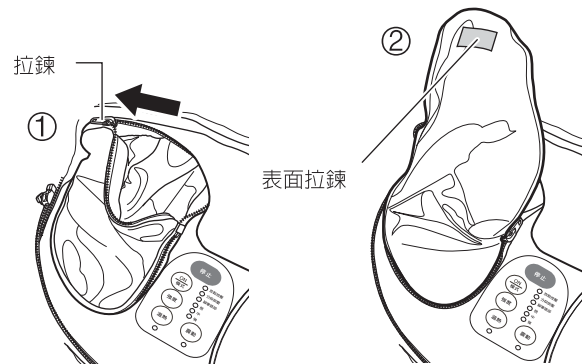


### 護罩的清洗



足部護罩以外（小腿肚用腿部護套等）請勿清洗。有可能造成故障的原因。

5. 確認洗標上的清洗圖示
6. 清洗護罩  
請使用40°C以下的弱水流，放入洗衣網袋內進行清洗。

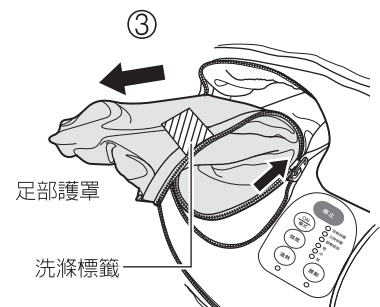

- 請勿乾洗。
- 請勿熨燙

7. 攤平皺褶後，置於陰暗處風乾  
請完全乾燥後再使用。

## 護罩的安裝方法


1. 將護罩內裏翻至外側，讓黏扣帶部分朝向下側，確認左右

將腳罩正面朝上(如右圖)，左側的護罩上設有拉鏈的拉頭部分。右側的護罩則沒有拉頭，只有鏈齒。

2. 確認本體的黏扣帶位置，將護罩下側前端部位的黏扣帶如右圖般滑入本體內部進行安裝

·請確實安裝左右兩側的黏扣帶。

·請確實拉妥本體與護罩之間的拉鏈。

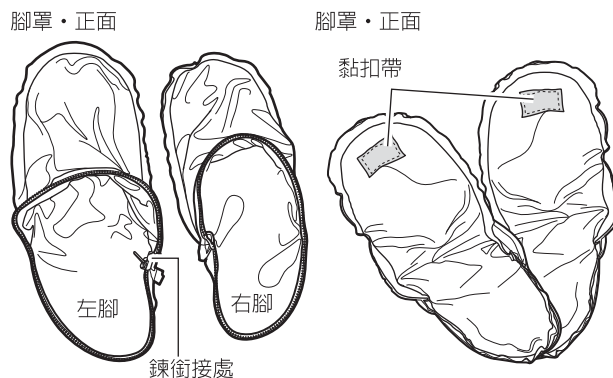




## 腿部護套的清潔保養



注意

- 足部護罩以外（小腿肚用腿部護套等）請勿清洗。有可能造成故障的原因。
- 拔下腿部護套的氣壓接頭時，請手持氣壓接頭部分拔下，勿拉扯通氣管。有可能造成破損、故障的原因。

腿部護套與本體相同，可以將浸泡在溫水或餐具用中性洗劑（柑橘類除外）中的柔軟抹布擰乾後擦拭，接著再用乾布輕輕地擦乾表面。請勿用力磨擦。有可能造成損傷或布面破損的原因。

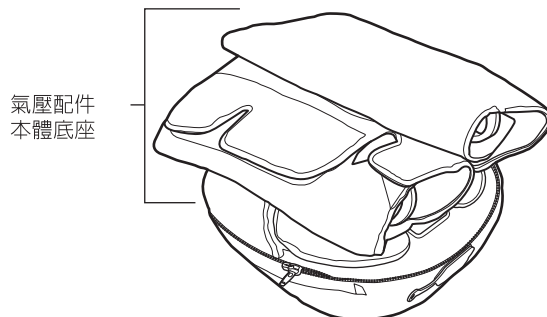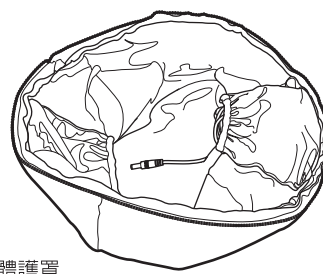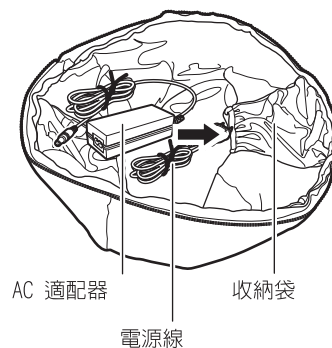

## 本體護罩的安裝方法


1. 將 A C 適配器及電源線放入本體護罩裏面的收納口袋
2. 將腿部護套折疊後置於本體上方

## 保養和保存 (接續)

### 3. 將本體護罩安裝至本體

將本體護罩與本體間的拉鍊拉頭配合鏈齒拉動一圈，安裝至本體。

- 長期間不使用時，請將附著的灰塵或毛髮等 (有可能造成發霉或滋生塵蟎的原因) 除去。放入塑膠袋內，避免堆積灰塵。
- 請保存在兒童無法伸手取得之處。

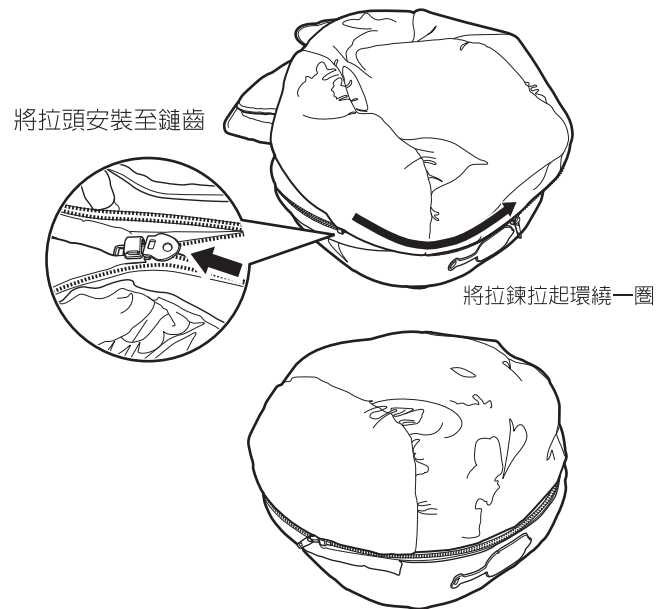

### 保存的方法

爲了不造成下次使用時的困擾，請清潔後保存在濕氣少的地方。

### 廢棄的方法

- 本機不可作為一般垃圾丟棄。廢棄時請遵照 (縣市政府) 的指示處理。

## 商品故障問題

 **警告** 非修理技術人員以外的人不得自行分解及修理。

狀況	主要原因	解決
電源無法啓動	• 電源連接線沒有插入電源插座。	將電源連接線確實地插入電源插座。
	• 電源連接線的連接插頭沒有插入 AC 適配器。	將連接插頭確實地插入 AC 適配器。
	• AC 適配器的 DC 插頭沒有插入本體 DC 電源連接器。	將 DC 插頭確實地插入 DC 電源連接器。
空氣無法充入腿部護套	• 空氣接頭沒有正確地插入本體的空氣連接器。	將空氣接頭確實地插入本體的空氣連接器。
空氣無法充入腿部護套	• 小腿肚周圍的尺寸設計得較寬鬆，多少有可能發生此狀況。	請自行用布類的物品墊在裡面因應。
腿部護套的黏扣帶接觸到腿部	• 定時器的設定為運轉約 15 分鐘後自動停止。	每次使用請控制在 15 分以內，並請避免在同一部位連續使用。
空氣無法排出	• 運轉仍在繼續。	按下停止按鍵，停止運轉。 如空氣仍無法排出，請試著將電源插頭拔下。
		如空氣仍無法排出，請試著將腿部護套的空氣接頭自本體拔下。
發出聲響或聲音很大	• 構造上本來就會發出聲響，並非故障。	請繼續使用。

# 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：收納氣壓腿部紓壓機  
Equipment name

型號(型式)：DFM-1601 R  
Type designation (Type)

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
插接器	○	○	○	○	○	○
電源線材	○	○	○	○	○	○
氣壓幫浦	○	○	○	○	○	○
內部塑料	○	○	○	○	○	○
震動馬達	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## **佳醫健康事業** 產品服務保證書（客戶保存）

親愛的佳醫產品愛用者，感謝您惠顧本公司產品，為確保您的權益—

1. 請上網登錄註冊，以確保會員保固權益。  
(<http://www.healthlife-excelsior.com.tw>)  
服務專線：0800-212-896
2. 敬請填寫此保證書購買日期，若未上網註冊、未填寫，將以出貨日期為起算日，或必須保留購買憑證。
3. 若未上網註冊，於維修時，請務必出示此產品保證書。
4. 保證內容記載條件：
  - ★自購買日起1年保固，耗材及配件不在保固範圍內。
  - ★於保證期限之內在正常使用下零件發生故障，本公司免費維修。
  - ★若因人為因素不當使用或擅自修理改造引起之故障，本公司得視機器狀況酌收維修費，敬請見諒。
  - ★本保證條件僅適用於台灣地區使用。

購買姓名：

購買品牌/機型： MOMiLUX 收納氣壓腿部舒壓機/DFM-1601 R

經銷商蓋章：

購買日期：

佳醫健康  
事業有限  
公司  
保證書  
章



**佳醫健康事業**

服務專線：0800-212-896  
新北市中和區中正路880號17樓  
[www.excelsior.com.tw](http://www.excelsior.com.tw)

